



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Profil stéroïdes

Sang

## Informations générales

### Examen

#### Indication diagnostique

Le profil stéroïdes comprend les analyses suivantes: androstènedione, corticostérone, cortisol, cortisone, 11-deoxycortisol, 21-deoxycortisol, dehydroepiandrosterone 3-sulfate (DHEA-S), deoxycorticostérone, dihydrotestostérone (DHT), 17-hydroxyprogésterone, 17-hydroxypregnénolone, pregnénolone, progésterone et la testostérone.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

#### Synonyme

profil stéroïdien, androstènedione, corticostérone, cortisol, cortisone, DHEA-S, 11-déoxycortisol, 21-déoxycortisol, déoxycorticostérone, dihydrotestostérone, 17-hydroxypregnénolone, 17-hydroxyprogésterone, pregnénolone, progésterone, testostérone, DHT

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

999069

##### Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

#### Autre formulaire de demande

##### Numéro de commande

999072

##### Lien

[040 - Chimie clinique - Epreuves dynamiques sang](#)

#### Epreuve dynamiques

Consulter les protocoles de prélèvement dépendant des tests

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

2 à 3 analyses sur héparinate de lithium:  
1 tube 4.9 ml héparinate de lithium

Androstènedione, DHEAS, 17-hydroxyprogestérone: la même monovette (ces composés font partie du profil)

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger et décanter le plasma  
Volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml  
Volume min pour l'analyse seule : 0.4 ml

#### Conservation

4°C  
Si > 24 h, congeler à -20°C

#### Conditions d'acheminement

Transporteur : à T°C ambiante  
Poste : à 4°C

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Interprétation** Le profil inclut les composés suivants: androstènedione, corticostérone, cortisol, cortisone, DHEA-S, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, désoxycorticostérone, dihydrotestostérone, 17-hydroxypregnénolone, 17-hydroxyprogestérone, pregnénolone, progestérone, testostérone  
[Intervalles de référence](#)

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • LC-MS/MS

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 225