Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_01581

V27 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Profil stéroïdes

Sang



Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Le profil stéroïdes comprend les analyses suivantes: androstènedione, corticostérone, cortisol, cortisone, 11-deoxycortisol, 21-deoxycortisol, dehydroepiandrosterone 3-sulfate (DHEA-S), deoxycorticostérone, dihydrotestostérone (DHT), 17-hydroxyprogésterone, 17-hydroxypregnénolone, pregnénolone, progestérone et la testostérone.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	profil stéroïdien, androstènedione, corticostérone, cortisol, cortisone, DHEA-S, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, désoxycorticostérone, dihydrotestostérone, 17-hydroxypregnénolone, 17-hydroxyprogestérone, pregnénolone, progestérone, testostérone, DHT
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang
Autre formulaire de demande	Numéro de commande 999072 Lien 040 - Chimie clinique - Epreuves dynamiques sang
Epreuve dynamiques	Consulter les protocoles de prélèvement dépendant des tests



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Préparation

2 à 3 analyses sur héparinate de lithium: 1 tube 4.9 ml héparinate de lithium

Centrifuger et décanter le plasma

Androstènedione, DHEAS, 17-hydroxyprogestérone: la même monovett (ces composés font partie du profil)

Traitement du prélèvement pour requérants externes

	Volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml Volume min pour l'analyse seule : 0.4 ml
Conservation	4°C Si > 24 h, congeler à -20°C
Conditions d'acheminement	Transporteur : à T°C ambiante Poste : à 4°C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24



Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

PrestataireLaboratoire de chimie cliniqueSiteBH18-100AdresseRue du Bugnon 46
1011 LausanneTube pneumatique439Horaire d'ouverture du laboratoire24/24HTéléphone021 31 44 121Site webChimie clinique

Résultats

InterprétationLe profil inclut les composés suivants: androstènedione,

corticostérone, cortisol, cortisone, DHEA-S, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, désoxycorticostérone, dihydrotestostérone, 17-hydroxyprogestérone, pregnénolone,

progestérone, testostérone <u>Intervalles de référence</u>

Méthode analytique

Principe de la méthode • LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

