Catalogue des analyses - Laboratoire

Groupes sanguins ABO et Rhésus D (RH1)

Informations générales

_			
C.,_	-	-	-
гха	m	ρ	п

But de l'analyse	Préalable à la transfusion de produits sanguins labiles Les groupes sanguins ABO et Rhésus D (RH1) du patient doivent être confirmés (2 prélèvements distincts)
Renseignement téléphonique	021 31 44 201
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Immuno-hématologie
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061244 Lien
	033 - Unité de médecine transfusionnelle



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel pédiatrique

Quantité ¹

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Volume minimumEnfants de 0 à < 4 mois: 1 Microtube 0.5 ml EDTA-K. Enfants de 4 mois à 1 tube EDTA-K 2.6 ml (et 1 tube EDTA-K 1.2 ml si groupe non connu).

Matériel néonatologie

Quantité 1

Contenant Microtube 0.5 ml EDTA-K

Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum Enfants de o à < 4 mois: 1 Microtube o.5 ml EDTA-K.

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant Oui

Congelé

Acheminement



Dépose des prélèvements	Unité de médecine transfusionnelle
Site	BH 18 606
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	549 PP07
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 314 65 67
Astreinte	021 314 65 67
Site web	<u>UMT</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Unité de médecine transfusionnelle
Site	BH 18 606
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 314 657
Astreinte	UMT
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Manuelle en gel ou en tubes selon la complexité du c

Oui

Unité de médecine transfusionnelle



Analyseur

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

Condition(s) spéciale(s)En fonction des résultats des examens complémentaires peuvent être

