

Catalogue des analyses - Laboratoire

Tests pré-transfusionnels

Informations générales

Examen

But de l'analyse Préalable à la transfusion de concentrés érythrocytaires

Renseignement téléphonique 021 31 44 201

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Immuno-hématologie

Synonyme Épreuves croisées

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
061244
Lien
[033 - Unité de médecine transfusionnelle](#)

Renseignements à fournir Date et heure de livraison des produits sanguins

Recommandations Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT
(<https://www.itransfusion.ch/fr/home>)

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Un échantillon doit être joint à la demande uniquement si les groupes sanguins sont confirmés et/ou si aucun échantillon n'est parvenu à l'UMT dans les 24 heures.

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Volume minimum

Enfants de 0 à < 4 mois: 1 Microtube 0.5 ml EDTA-K + sang maternel 1 tube EDTA-K 4.9 ml. Enfants de 4 mois à < 16 ans : 1 tube EDTA-K 2.6 ml (et 1 tube EDTA-K 4.9 ml si groupe non connu)

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum

Enfants de 0 à < 4 mois: 1 Microtube 0.5 ml EDTA-K + sang maternel 1 tube EDTA-K 4.9 ml.

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

Oui

Congelé

Non

Acheminement

Dépose des prélèvements

Unité de médecine transfusionnelle

Site

BH 18 606

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique

549 PP07

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 314 65 67

Astreinte

021 314 65 67

Site web

UMT

Analytique

Prestataire

Prestataire

Unité de médecine transfusionnelle

Site

BH 18 606

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture du laboratoire

24h/24

Téléphone

021 314 657

Astreinte

UMT

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Manuelle en gel ou en tubes selon la complexité du cas

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

70.7

Condition(s) spéciale(s)

Le tarif varie fortement en fonction des résultats obtenus et des analyses complémentaires réalisées