Catalogue des analyses - Laboratoire

Tests pré-transfusionnels

Informations générales

| C | _ | | _ | |
|----------|---|---|---|---|
| Ex | а | m | e | n |

| But de l'analyse | Préalable à la transfusion de concentrés érytrocytaires |
|----------------------------|--|
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 201 |
| Horaire de réalisation | 24h/24 |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | • Immuno-hématologie |
| Synonyme | Épreuves croisées |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 061244 Lien 033 - Unité de médecine transfusionnelle |
| Renseignements à fournir | Date et heure de livraison des produits sanguins |
| Recommandations | Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT (https://www.itransfusion.ch/fr/home) |
| Pré analytique | |
| Prélèvement | |
| Nature | Sang veineux |
| Matériel standard | |
| Quantité | 1 |
| Contenant | Tube 4.9 ml EDTA-K |





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Un échantillon doit être joint à la demande uniquement si les groupes sa confirmés et/ou si aucun échantillon n'est parvenu à l'UMT dans les der

Matériel pédiatrique

Quantité

Tube 2.6 ml EDTA-K EDTA KE/2.6 ml Name Date of birth Ref. No.

1

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999009

Volume minimum

Enfants de 0 à < 4 mois: 1 Microtube 0.5 ml EDTA-K + sang maternel 1 tı K 4.9 ml. Enfants de 4 mois à < 16 ans : 1 tube EDTA-K 2.6 ml (et 1 tube F ml si groupe non connu)

Matériel néonatologie

Quantité

| Contenant | Microtube 0.5 ml EDTA-K Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434 |
|----------------|--|
| Volume minimum | Enfants de 0 à < 4 mois: 1 Microtube 0.5 ml EDTA-K + sang maternel 1 tube EDTA-K 4.9 ml. |

Stabilité maximale avant envoi

| Ambiant | Oui |
|---------|-----|
| Congelé | Non |

Acheminement

| Dépose des prélèvements | Unité de médecine transfusionnelle |
|-------------------------|------------------------------------|
| Site | BH 18 606 |
| Adresse | Bugnon 46 |



| | 1011 Lausanne |
|-------------------------------------|---------------|
| Pneumatique | 549 PP07 |
| Horaire d'ouverture de la réception | 24h/24 |
| Téléphone | 021 314 65 67 |
| Astreinte | 021 314 65 67 |
| Site web | <u>UMT</u> |

Analytique

Prestataire

| Prestataire | Unité de médecine transfusionnelle |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Site | BH 18 606 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | 24h/24 |
| Téléphone | 021 314 657 |
| Astreinte | UMT |

Méthode analytique

Principe de la méthode

• Manuelle en gel ou en tubes selon la complexité du cas

Post analytique

Tarif

| Tarif (CHF) | 70.7 |
|-------------|------|
| | |

Condition(s) spéciale(s)

Le tarif varie fortement en fonction des résultats obtenus et des analyses complémentaires réalisées

