Catalogue des analyses - Laboratoire  $\begin{array}{c} DLA\_INV\_01\_01615 \\ V3-06/11/2025 \end{array}$ 

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Toxoplasmose Avidité**

Sérodiagnostic IgG



## Informations générales

#### Examen

But de l'analyse	Permettre de dater plus précisément une infection (en particulier lors de découverte d'infection récente durant la grossesse)
Indication diagnostique	<ul> <li>Analyse devant idéalement être réalisée dans les quatre premiers mois de grossesse.</li> <li>Analyse non effectuée chez des enfants de moins d'1 an</li> </ul>
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Sérologie microbienne
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 913346 Lien 060 - IMU - Examens sérologiques
Renseignements à fournir	Si cette analyse est demandée isolément, merci de nous fournir vos résultats sérologiques toxoplasmose (IgG et IgM)



### Pré analytique

#### **Prélèvement**

• Sang veineux

Matériel standard

**Quantité** 

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel

Common Control on Cont

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

**Contenant(s) autre(s)** Sérum décanté après centrifugation

**Volume minimum** 0.5 ml de sérum décanté

Matériel pédiatrique

Quantité <sup>1</sup>

**Contenant** Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

**Contenant(s) autre(s)** Sérum décanté après centrifugation

**Volume minimum** 0.5 ml de sérum décanté

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 30 min

**Réfrigéré** Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**Centrifuger durant 10 minutes à 2500G

Décanter le sérum, volume minimum : 1 ml

Conservation 4°C



**Conditions d'acheminement** 

à T° ambiante

à -20°C si envoi >8 heures

**Acheminement** 

#### **Conditions d'acheminement**

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



### **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Interprétation	Interprétation incluse dans le rapport
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• ELFA
Analyseur	VIDAS

### Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé Cinq ans

**Tarif** 

Tarif (CHF) 63.9

Condition(s) spéciale(s)

Supplément selon la liste des analyses facturables en sus

