



Catalogue des analyses - Laboratoire

Cytomégalovirus Avidité

Sérodiagnostic IgG

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Permettre de dater plus précisément une infection (en particulier lors de découverte d'infection récente durant la grossesse)

Indication diagnostique

- Analyse devant idéalement être réalisée dans les quatre premiers mois de grossesse.
- Analyse non effectuée chez les enfants de moins d'1 an
- Noter que la maturation d'avidité peut être retardée chez les patient-e-s immunocompromis-es

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Sérologie microbienne

Synonyme

CMV

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande**

913346

Lien

[060 - IMU - Examens sérologiques](#)

Renseignements à fournir

Si cette analyse est demandée isolément, merci de nous fournir vos résultats sérologiques Cytomégalovirus (IgG et IgM)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Contenant(s) autre(s)

Sérum décanté après centrifugation

Volume minimum

1 ml de sérum décanté

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Contenant(s) autre(s)

Sérum décanté après centrifugation

Volume minimum

1 ml de sérum décanté

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

24h

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger durant 10 minutes à 2500G
Décanté le sérum, volume minimum : 1 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement	Acheminement dans les 12h (jours ouvrables) post prélèvement : T° ambiante Acheminement au-delà de 12h (jours ouvrables) post prélèvement : congelé
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Interprétation	Interprétation incluse dans le rapport
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• ELFA
Analyseur	VIDAS

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	Echantillon aliquoté : 6 jours post-réception au laboratoire
Aliquote congelé	3 ans
Tarif	
Tarif (CHF)	29.7
Condition(s) spéciale(s)	Supplément selon la liste des analyses facturables en sus