



Catalogue des analyses - Laboratoire

Cytomégalovirus Avidité

Sérodiagnostic IgG

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Permettre de dater plus précisément une infection (en particulier lors de découverte d'infection récente durant la grossesse)
Indication diagnostique	<ul style="list-style-type: none"> Analyse non effectuée chez les enfants de moins d'1 an Noter que la maturation d'avidité peut être retardée chez les patient-e-s immunocompromis-es
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Sérologie microbienne
Synonyme	CMV
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 913346</p> <p>Lien 060 - IMU - Examens sérologiques</p>
Renseignements à fournir	Si cette analyse est demandée isolément, merci de nous fournir vos résultats sérologiques Cytomégalo virus (IgG et IgM)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Contenant(s) autre(s)

Sérum décanté après centrifugation

Volume minimum

0.5 ml de sérum décanté

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Contenant(s) autre(s)

Sérum décanté après centrifugation

Volume minimum

0.5 ml de sérum décanté

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

30 min

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger durant 10 minutes à 2500G

Décanner le sérum, volume minimum : 1 ml

Conservation

4°C



Conditions d'acheminement	à T° ambiante à -20°C si envoi >8 heures
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Interprétation	Interprétation incluse dans le rapport
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> • ELFA
Analyseur	VIDAS

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	Cinq ans
Tarif	
Tarif (CHF)	29.7
Condition(s) spéciale(s)	Supplément selon la liste des analyses facturables en sus