

Catalogue des analyses - Laboratoire

Recherche de schistocytes

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse Toujours associée à une formule sanguine complète microscopique

Renseignement téléphonique 021 31 44 200

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Hématologie cellulaire

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
999071
Lien
[023 - Hématologie hémostatse](#)

Renseignements à fournir Noter spécifiquement "recherche de schistocytes" dans renseignements cliniques.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang capillaire
- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s) Sang capillaire: uniquement lorsqu'il est nécessaire de faire un microprélèvement (Pédiatrie, Néonatalogie, Oncologie)

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s)

Tube 1.2 ml EDTA-K

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

6h

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Hématologie générale 24/7
Site	BH18-100
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 31 44 200
Site web	Hématologie générale 24/7

Résultats

Délai de rendu < 2h

Interprétation

Paramètres testés: FSS + Répartition (différenciation) leucocytaire au microscope

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Microscopie optique

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

3 jours à température ambiante

Tarif

Tarif (CHF)

23.4

Condition(s) spéciale(s)

Le prix indiqué est celui d'une répartition microscopique auquel s'ajoute 9 CHF pour la FSS.