

Catalogue des analyses - Laboratoire

IL-6

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage du taux sérique d'une cytokine pro-inflammatoire.

Renseignement téléphonique

021 31 40 805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Inflammation

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999073

Lien

[050 - Immunologie](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dosages des médicaments biologiques.

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dosages des médicaments

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml

Conservation

-20°C

Conditions d'acheminement

-20°C

Acheminement

Conditions d'acheminement

Réception du matériel dans les 4 heures post prélèvement et du lundi au vendredi à 15h00 au plus tard .

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	Immunologie et allergie

Résultats

Délai de rendu < 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • ECL



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

6 mois

Tarif

Tarif (CHF)

78.3