

Catalogue des analyses - Laboratoire

Beta-trace protéine

Liquides d'écoulement/ Sérum

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche de LCR dans les liquides d'écoulements (otorrhée,
rhinorrhée, autres...)
Un tube sérum (sans gel) concomitant à l'écoulement est demandé.

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence et/ou horaire d'exécution

1x/jour du lundi au vendredi.
Echantillon analysé le jour même si le prélèvement parvient au
laboratoire avant 14h30.

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

BTP

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061232

Lien

[012 - Chimie clinique - Matériel spécial](#)

Renseignements à fournir

Cocher bêta-trace protéine sur le bon de demande 012- Matériel
spécial
Renseigner l'origine du prélèvement sous commentaires.

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Recueillir directement sur un tampon ou une gaze, à placer dans un
tube stérile.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)

Joindre un tube 2.7 mL sérum sans gel

Volume minimum

écoulement volume minimum 100µL

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Envoyer rapidement à température ambiante.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Les échantillons doivent être acheminés à température ambiante.
La congélation des prélèvements est à éviter.
Si demande externe, le sérum doit être centrifugé et décanté.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Résultats	
Délai de rendu	< 4h
Interprétation	Résultat rendu le jour même si le prélèvement parvient au laboratoire avant 12h30.
Méthode analytique	
Analyseur	BN Prospec (Siemens)
Post analytique	
Tarif	
Tarif (CHF)	283.5