

Catalogue des analyses - Laboratoire

Hépatite D

Virémie par PCR quantitative

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Evaluation de la charge virale HDV
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, "staging" de la maladie
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Virologie• Hépatites virales
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si acheminement impossible dans les 24 heures post-prélèvement
Centrifuger durant 15 min à 1000g
Décanter le plasma. Volume minimal : 2.5 ml

Conservation

L'échantillon à 4°C
Le plasma à 4°C pendant 6j, au delà, conserver à -20°C.

Conditions d'acheminement

L'échantillon à température ambiante

Acheminement

Conditions d'acheminement

Réception du matériel dans les 24 heures post prélèvement.
Le vendredi et les veilles de jours fériés avant 15h00 au plus tard.



Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	Immunologie et allergie

Résultats

Délai de rendu 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode

- PCR en temps réel

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 119.7