



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Hépatite B**

Analyse de résistance génotypique et détermination du génotype

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Suivi thérapeutique

**Indication diagnostique** Bilan avant traitement, échec thérapeutique  
Recherche de résistances (Transcriptase inverse, polymérase et  
antigène HBs). Les acides aminés suivant sont évalués: L80,  
I169,V173,L180,A181,T184,S202,M204,N236,M250.

**Renseignement téléphonique** 021 31 40 805

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution** 1x/semaine

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité**

- Virologie
- Hépatites virales

### Prescription

**Formulaire de demande**

Numéro de commande  
999073  
Lien  
050 - Immunologie

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux


### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K

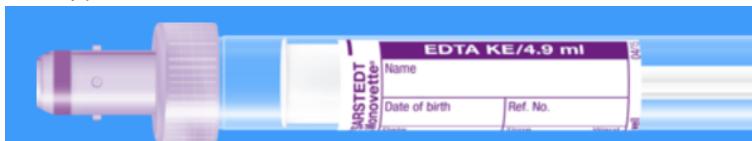

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013


### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K

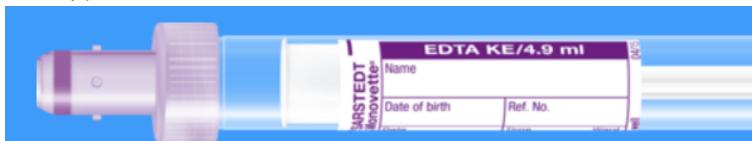

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit et we

### Traitements du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Si acheminement impossible dans les 72 heures post-prélèvement  
Centrifuger durant 15 min à 1000g  
Décanter le plasma. Volume minimal : 1.6 ml

#### Conservation

L'échantillon à 4°C  
le plasma à -20°C

#### Conditions d'acheminement

L'échantillon à température ambiante  
le plasma congelé

### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
--------------------	---

<b>Site</b>	BH18-100
-------------	----------

<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
----------------	-----------------------------------

<b>Tube pneumatique</b>	439
-------------------------	-----

<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
---	--

<b>Téléphone</b>	021 31 40 805
------------------	---------------

<b>Site web</b>	<a href="#">Immunologie et allergie</a>
-----------------	---

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	1-2 semaines
-----------------------	--------------

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NGS</li><li>• PCR</li><li>• Séquençage</li></ul>
-------------------------------	--



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 306.9