

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Hépatite B

Résistance et génotype

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Suivi thérapeutique
<b>Indication diagnostique</b>	Bilan avant traitement, échec thérapeutique Recherche de résistances (Transcriptase inverse, polymérase et antigène HBs). Les acides aminés suivant sont évalués: L80, I169, V173, L180, A181, T184, S202, M204, N236, M250.
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hépatites virales</li> <li>• Virologie</li> </ul>
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 741030 <b>Lien</b> <a href="#">050 - Immunologie</a>

## Pré analytique

<b>Prélèvement</b>	
<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sang veineux</li> </ul>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

## Matériel pédiatrique

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

## Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit et we

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation** Si acheminement impossible dans les 72 heures post-prélèvement  
Centrifuger durant 15 min à 1000g  
Décanter le plasma. Volume minimal : 1.6 ml

**Conservation** L'échantillon à 4°C  
le plasma à -20°C

**Conditions d'acheminement** L'échantillon à température ambiante  
le plasma congelé

## Acheminement

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 40 805

**Site web** [Immunologie et allergie](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 1-2 semaines

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- NGS
- PCR
- Séquençage

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 306.9