

Catalogue des analyses - Laboratoire

Kit hypoglycémie

Information(s) importante(s)

Attention

- Condition particulière de préparation

Informations générales

Examen**But de l'analyse**

Réaliser un bilan métabolique complet lors d'un épisode d'hypoglycémie.

Utiliser les enveloppes de kit prévues à cet effet. Ces enveloppes sont disponibles dans les services d'urgence de HEL, SIPI, Soins continus et étage de pédiatrie ainsi qu'au laboratoire de Chimie clinique BH18-101.

Pour les demandeurs externes, merci de commander ces kits au numéro de téléphone suivant: 079 556 89 21

Des volumes minimaux ont été calculés, merci de les respecter afin que la totalité des analyses soient effectuées.

L'envoi d'un kit doit être annoncé par e-mail à l'adresse:
ccl.pmo1@chuv.ch

Indication diagnostique

Se référer au document suivant : [Kit Hypoglycémies](#)

Préparation du patient

Prélèvements sanguins à prélever obligatoirement avant resucrage.
Le resucrage ne doit pas être retardé pour prélever les urines.

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription**Renseignements à fournir**

010 - Chimie clinique - Sang
011 - Chimie clinique - Urine

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang
- Urine fraîche

Instruction(s) particulière(s)

Se référer au document suivant: [Kit Hypoglycémies](#)

Matériel standard

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Contenant(s) autre(s)

Tube 2.6 ml héparinate de lithium
Tube 2.6 ml sérum sans gel
Microtube 0.3 ml EDTA-K
Microtube 0.3 ml Fluorure de Sodium
Tube 8.5 ml pour Urine

Volume minimum

Tube 2.6 ml héparinate de lithium: 2.6 ml
Tube 2.6 ml sérum sans gel: 2.6 ml
Microtube 0.3ml EDTA-K: 0.3 ml
Microtube 0.3ml Fluorure de Sodium: 0.3 ml
Tube 8.5ml pour Urine: 2 ml

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

15 min

Congelé

12h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Sang: Centrifuger immédiatement durant 5 mn à température ambiante à 3600g
Décanter le plasma et congeler
Urine: Congeler immédiatement

Conservation

Conserver le plasma dans le congélateur -80°C

Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique

Acheminement



Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Post analytique

Tarif

Condition(s) spéciale(s) Tarification selon analyses effectuées