Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_01655

V6 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Cabotegravir

Sang



Informations générales

Examen	
CValliEll	

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacocinétique de taux sanguin de cabotegravir (absence d'intervalle de référence, évaluation seulement de la plausibilité du taux)
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse, doute sur la compliance, grossesse, étude
Renseignement téléphonique	Laboratoire: 021 314 42 71 Interprétation des taux (TDM): 021 314 14 04
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Spécialité	Dosages de médicaments
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 016 - Pharmacologie clinique
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament (+début du traitement ou de dernier changement posologique si<30j)
Pré analytique	
Prélèvement	
Nature	Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 4-5h post-dose)

Matériel standard Quantité

Instruction(s) particulière(s)


1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Délai d'équilibration: dès 2 semaines à posologie constante

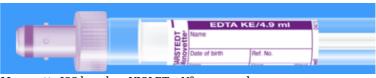

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Microtube 0.5 ml EDTA-K

Winner in the second of the se

Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s) Microtube 0.3 ml sérum sans gel

1

Volume minimum Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec

labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 48h

Réfrigéré 48h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

PréparationCentrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

Conservation A T° amb : Sang complet max 48h ou plasma max 48h jusqu'à

réception au laboratoire.

Sinon congeler le plasma:Idéalement à -80°C, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement

Congelé

Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés.

Recommandations d'envoi matériel HIV

Acheminement

Conditions d'acheminementRéception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours

fériés jusqu'à 15h00.


Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma

PP 439. Urgence: par porteur + nous contacter



Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24.
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 271
Résultats	
Interprétation	<48h dès résultat
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• HPLC-MS/MS



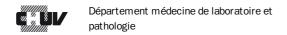

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	6 jours
Aliquote congelé	2 semaines
Tarif	
Tarif (CHF)	144
Prestation Tarmed	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min

