

Catalogue des analyses - Laboratoire

Levures (*Candida*) - Culture

Urines

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche spécifique de levures (*Candida* ou autres) dans les échantillons d'urines.
- Les urines natives doivent être acheminées rapidement au laboratoire durant les heures d'ouverture.
- En dehors des heures d'ouverture, elles doivent impérativement être conservées à 4 °C.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Mycologie - levures

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine
- Urine milieu du jet
- Urine néphrostomie
- Urine sac (enfant)
- Urine sondage aller retour
- Urine sonde à demeure
- Urine sondée
- Urine stabilisée

Instruction(s) particulière(s)

En cas de demande conjointe de bactériologie culture ne pas envoyer d'urine début du jet (pas indiqué pour la culture)

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

UriSponge (bouchon jaune) (urine stabilisée)



N° commande : 935607

Contenant(s) autre(s)

Tube 8.5 ml pour urine ou Récipient stérile, PS, fond plat

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul tube suffit pour bactériologie et levure culture

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Utilisation d'un tube pour urines stabilisées

Conservation

T° ambiante

Conditions d'acheminement

T° ambiante, délai < 24 heures

Acheminement

Conditions d'acheminement

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de microbiologie

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

Astreinte

Microbiologie

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- Culture



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

10 jours

Tarif

Tarif (CHF)

63

Condition(s) spéciale(s)

- La culture de Levure n'est pas facturée si elle est effectuée conjointement à la Bactériologie culture.
- Le tarif indiqué correspond à la position 3343.00 d'un échantillon positif (Si négatif, c'est la position 3342.00 qui est appliquée)