

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Détermination du statut mutationnel IGHV avec primers Leaders

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Cette technique de séquençage haut débit (sur Miseq) permet de déterminer 2 facteurs pronostiques chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, avant traitement.
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 209
<b>Rendez-vous téléphonique nécessaire</b>	Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/mois
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oncohématologie</li> </ul>
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> <b>Info</b> Disponible au laboratoire <b>Lien</b> <a href="#">026 - Hématologie spéciale</a>
<b>Renseignements à fournir</b>	Motivation/reenseignements cliniques sont essentiels
<b>Recommandations</b>	Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44209

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Moelle osseuse
- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.

#### Matériel standard

#### Quantité

3

#### Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

#### Contenant(s) autre(s)

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans u

#### Volume minimum

Sang: 20 ml  
Moelle: 2 à 3 ml

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biologie m

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

Idem adulte

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

24h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conditions d'acheminement

Envoi express - Température ambiante

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant 12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Téléphone</b>	021 31 44 209
<b>Site web</b>	<a href="#">Hématologie moléculaire</a>

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	1-2 semaines
<b>Interprétation</b>	Polyclonal, monoclonal, monobclonal, rapport médical
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amplification par PCR</li> </ul>
<b>Technique</b>	Amplification puis séquençage par NGS

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Aliquote congelé</b>	ADN: 5 ans
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	1209.6