Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_01667

V8 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Mélatonine Libre

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube sur la glace
- Ne pas envoyer par poste pneumatique
- Condition particulière de préparation

Informations générales

c.	- m	
CX.	ап	ıen

Indication diagnostique	Exploration des troubles du rythme du sommeil, dans les cas de décalage de cycles, et le diagnostic des pinéalomes	
Préparation du patient	24h avant le prélèvement, ne pas absorber de noix, banane, chocolat, prune, avocat, aubergine, tomate, ananas, kiwi, plantain, caféine (café, thé), nicotine, alcool. Etre à jeûn.	
Renseignement téléphonique	021 31 40 741	
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire	
Fréquence d'exécution	1x/semaine	
Fréquence et/ou horaire d'exécution 1x/semaine le lundi matin; rendu des résultats le mardi		
Synonyme	Melatonin, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, N-acétyl-5-méthoxytryptamine	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280	

Lien



<u>019 - Laboratoire catécholamines et peptides</u>

Pré analytique

Prélèvement

Nature

· Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)


Prélever le sang sur tube EDTA et acheminer immédiatement le prélèvement au laboratoire des Catécholamines.


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

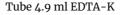

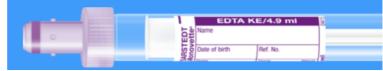

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 tube de 4.9 ml EDTA-K suffit pour la mélatonine, la sérotonine plasmatique

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Prélever le sang et centrifuger immédiatement à 2500 g pendant 10 minutes à 4°C. Préparer 2 aliquots de plasma de minimum 500ul et congeler tout de suite (idéalement dans l'azote liquide).
Conditions d'acheminement	Acheminer les échantillons congelés avec de la glace sèche ou un bloc de congélation directement au laboratoire des Catécholamines et Peptides, Laboratoire 6019, Avenue Pierre-Decker 5, 1011 Lausanne
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Par transporteur (THEO) au laboratoire des Catécholamines à l'Hôpital Nestlé, 6ème étage, n°6019, immédiatement après le prélèvement.



Dépose des prélèvements	Réception du laboratoire des catécholamines et peptides
Site	NES 06-6019
Adresse	Avenue Pierre Decker 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 741

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire des catécholamines et peptides
Site	NES 06-6019
Adresse	Avenue Pierre Decker 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 741
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine

• LC-MS/MS

• Spectrométrie de masse

Post analytique

Principe de la méthode

Méthode analytique

Tarif

Tarif (CHF)

