



Catalogue des analyses - Laboratoire

5-HIAA

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube sur la glace
- Ne pas envoyer par poste pneumatique
- Condition particulière de préparation

Informations générales

Examen

| | |
|--|--|
| Indication diagnostique | Syndrome carcinoïde |
| Préparation du patient | 24h avant le prélèvement, ne pas absorber de noix, banane, chocolat, prune, avocat, aubergine, tomate, ananas, kiwi, plantain, caféine (café, thé), nicotine, alcool Etre à jeûn |
| Renseignement téléphonique | 021 31 40 741 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/semaine |
| Fréquence et/ou horaire d'exécution | 1x/semaine le lundi matin; rendu des résultats le mardi |
| Synonyme | 5-HIAA, Acide 5-hydroxy-indole acétique, HIAA-5, hydroxyindole acetate-5, 5-hydroxyindole acétate |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 019 - Laboratoire catécholamines et peptides |

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Prélever le sang sur tube EDTA et acheminer immédiatement le prélèvement au laboratoire des Catécholamines.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 tube de 4.9 ml EDTA-K suffit pour la sérotonine, le 5-HIAA plasmat et mélatonine

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Prélever le sang et centrifuger immédiatement à 2500 g pendant 10 minutes à 4°C. Préparer 2 aliquots de plasma de minimum 500 µl et congeler tout de suite (idéalement dans l'azote liquide).

Conditions d'acheminement

Acheminer les échantillons congelés avec de la glace sèche ou un bloc de congélation directement au laboratoire des Catécholamines et Peptides, Laboratoire 6019, Avenue Pierre-Decker 5, 1011 Lausanne.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Par transporteur (THEO) au laboratoire des Catécholamines à l'Hôpital Nestlé, 6ème étage, n°6019, immédiatement après le prélèvement.

Dépose des prélèvements

Réception du laboratoire des catécholamines et peptides

Site

NES 06-6019

Adresse

Avenue Pierre Decker
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture de la réception Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 741

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire des catécholamines et peptides

Site NES 06-6019

Adresse Avenue Pierre Decker
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 741

Résultats

Délai de rendu 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode

- LC-MS/MS
- Spectrométrie de masse

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 72.9