



Catalogue des analyses - Laboratoire

Mycophénolate

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage du taux sanguin (TDM) de **mycophénolate** (MPA) et de son métabolite **mycophénolate-glucuronide** (MPAG).

Absence d'intervalle de référence, évaluation seulement de la plausibilité du taux.

Le résultat du taux du **mycophénolate acyl-glucuronide** (AcMPAG), un autre métabolite important du mycophénolate, sera rendu uniquement si l'échantillon sanguin parvient <2h au laboratoire ou plasma congelé.

Indication diagnostique

Sur avis du spécialiste. L'interprétation clinique (TDM) du dosage n'est actuellement pas validée.

Renseignement téléphonique

Laboratoire: 021 314 42 71

Interprétation des taux (TDM): 021 314 25 00

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Le jeudi, rendu des résultats le vendredi

Spécialité

- Dosages de médicaments

Synonyme

Mycophénolate Mofétil, Acide mycophénolique, CellCept, Myfenax, Myfortic

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280

Lien

[015 - Pharmacologie - Antinéoplasiques et agents immunomodulants](#)

Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament (+début du traitement ou de dernier changement posologique si<30j)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: au résiduel (avant la dose suivante), au min 6h post-dose
Délai d'équilibration: 4 jours à posologie constante

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

Contenant(s) autre(s)

Sérum sans gel 4.9 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml sérum

Volume minimum

Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

48h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

Conservation

Plasma: à -20°C

ATTENTION: Le résultat du taux du AcMPAG, 2ème métabolite majeur du mycophénolate, sera rendu uniquement si l'échantillon sanguin parvient <2h au laboratoire ou **plasma congelé** (Centrifuger 2000g,

10min, à 4°C).

Conditions d'acheminement

Congelé

Acheminement**Conditions d'acheminement**

Si dépassement des délais de stabilité : envoi du plasma congelé.
PP 439. Urgence: par porteur + nous contacter

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de pharmacologie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
BH18-218
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 44 271

Résultats

Délai de rendu 2-3 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode • HPLC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 6 jours

Aliquote congelé 2 semaines

Tarif

Tarif (CHF) 135

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min