



Catalogue des analyses - Laboratoire

Dépistage MRSA

Frottis pour recherche de MRSA

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Cet examen comprend une recherche spécifique de *Staphylococcus aureus* résistant à la méticiline (MRSA)

Indication diagnostique

Cette recherche s'effectue selon les directives de l'unité Hygiène Prévention et Contrôle de l'Infection (HPCI). Les motivations pour cette recherche figurent sur le bon d'analyse. Elle peut être effectuée en urgence pour des motifs appropriés selon les mêmes directives.

Renseignement téléphonique

021 31 40 260

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hygiène prévention et contrôle de l'infection

Prescription

Formulaire de demande**Numéro de commande**

Disponible via le laboratoire d'épidémiologie au 021 31 40 260

Renseignements à fournir

Motivation. Sans cette information, l'analyse ne sera pas effectuée.

Recommandations

Un bon par prélèvement

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Frottis

Instruction(s) particulière(s)

Frottis de nez, gorge et plis inguinaux. Utiliser l'écouvillon avec la marque rouge en dernier pour le nez.

1. Frottis des plis de l'aîne

- Frotter les deux plis de l'aîne en tournant l'écouvillon. Attention à ne pas inclure des selles (peut causer des interférences avec le test)
- Ouvrir le bouchon du tube et insérer l'écouvillon jusqu'au fond
- Tremper et remuer doucement l'écouvillon dans le milieu pendant 5 secondes
- Soulever l'écouvillon au dessus du liquide et le faire doucement rouler contre la paroi du tube pour récupérer le liquide en excès de la pointe de l'écouvillon
- Jeter l'écouvillon dans une poubelle

2. Frottis de gorge

- Presser et tourner l'écouvillon contre les amygdales et le fond de la gorge
- Procéder de la même manière que pour le frottis des plis de l'aîne

3. Frottis de nez

- Ecouvillonner les deux narines en tournant 3-4 fois l'écouvillon sur une profondeur maximum de 1-2 cm
- Mettre l'écouvillon dans le tube et le casser au point de marquage, laisser l'écouvillon dans le tube
- Bien fermer le tube avec le capuchon

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant(s) autre(s)

MRSA Eswab 1LQ amies test tube + 2 tiges roses floquées + 1 tige blanche floquée
N° commande : 934849

Stabilité maximale avant analyse**Ambiant**

Nuit

Réfrigéré

Weekend (2 nuits)

Acheminement**Conditions d'acheminement**

Envoi dans une pochette kangourou, le prélèvement doit être séparé du bon de demande.



Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire d'épidémiologie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 12h00 ; 13h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 14h30 à 17h00 uniquement pour urgences
Téléphone	021 31 40 260
Site web	Epidémiologie

Résultats

Interprétation

Il n'est pas possible d'obtenir des résultats sur la présence d'autres germes pathogènes.

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture sur des milieux sélectifs