



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Coronavirus SARS-CoV-2

Sécrétions nasopharyngées

## Informations générales

### Examen

|  |  |
|--|--|
| <b>But de l'analyse</b>                    | Recherche de virus respiratoire Coronavirus SARS-CoV-2 respiratoire  |
| <b>Indication diagnostique</b>             | Ce test est d'un usage restreint pour la recherche de SARS-CoV-2. Il est réservé à des patients remplissant des critères cliniques et épidémiologiques associés au COVID-19. |
| <b>Renseignement téléphonique</b>          | 021 31 44 107  |
| <b>Horaire de réalisation</b>              | Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence   |
| <b>Fréquence et/ou horaire d'exécution</b> | 7/7 jours<br>Pour les analyses concernant les hospitalisations du service des Urgences 7/7 jours 24/24 heures.   |
| <b>Analyse accréditée</b>                  | OUI  |
| <b>Spécialité</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Diagnostic moléculaire microbiologique</li></ul>   |
| <b>Synonyme</b>                            | Nouveau coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2  |
| <b>Prescription</b>                        |  |
| <b>Formulaire de demande</b>               | <b>Numéro de commande</b><br>743200<br><b>Lien</b><br><a href="#">151 - IMU - Examens microbiologiques</a>   |

## Pré analytique

### Prélèvement

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Nature</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>Sécrétions nasopharyngées</li></ul> |
| <b>Matériel standard</b> |   |
| <b>Quantité</b>          | 1   |
| <b>Contenant</b>         | UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus                       |



N° commande : 917995

**Contenant(s) autre(s)**

Milieu de transport équivalent au UTM RT

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré**

Oui

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

**Site web**Réception des laboratoires

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

**Site**

BH18-100

**Adresse**Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

**Astreinte**Service de garde d'urgence 7 jours sur 7  
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07**Site web**Microbio moléculaire**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- PCR en temps réel

## Post analytique

**Tarif****Tarif (CHF)**

119