



Catalogue des analyses - Laboratoire

Rapport sFlt-1/PIGF

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Exclusion d'une prééclampsie
Analyse remboursée par la LAMal à partir de la 20ème semaine de grossesse
Seuil décisionnel dès la 24ème semaine de grossesse

Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante respectant les conditions préanalytiques (prélèvement acheminé immédiatement au laboratoire)

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

ratio sFlt-1/PIGF, fms-like tyrosine kinase 1, facteur de croissance placentaire, facteur anti-angiogénique, facteur pro-angiogénique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
999069
Lien
[010 - Chimie clinique – Sang](#)

Renseignements à fournir

âge gestationnel en SA

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
----------	---

Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel

Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le sérum.
-------------	-----------------------------------

Conservation	Conserver le sérum séparé maximum 24 heures à 4°C. Sinon, congeler le sérum. NB: un seul cycle de congélation/décongélation
--------------	---

Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum séparé congelé.
---------------------------	----------------------------------

Acheminement	
--------------	--

Conditions d'acheminement	Acheminer le tube immédiatement au laboratoire.
---------------------------	---

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
-------------------------	----------------------------

Site	BH18-100
------	----------

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
---------	----------------------------

Pneumatique	439
-------------	-----

Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
-------------------------------------	--------

Téléphone	021 31 44 280
-----------	---------------

Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>
----------	--



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Délai de rendu < 8h

Méthode analytique

Analyseur cobas 8000 / e801, Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 1 an

Tarif

Tarif (CHF) 144