

Catalogue des analyses - Laboratoire

Rapport sFlt-1/PIGF

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Exclusion d'une prééclampsie
Analyse remboursée par la LAMal à partir de la 20ème semaine de grossesse
Seuil décisionnel dès la 24ème semaine de grossesse

Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante respectant les conditions préanalytiques (prélèvement acheminé immédiatement au laboratoire)

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

ratio sFlt-1/PIGF, fms-like tyrosine kinase 1, facteur de croissance placentaire, facteur anti-angiogénique, facteur pro-angiogénique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir

âge gestationnel en SA

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le sérum.

Conservation

Conserver le sérum séparé maximum 24 heures à 4°C.

Sinon, congeler le sérum.

NB: un seul cycle de congélation/décongélation

Conditions d'acheminement

Envoyer le sérum séparé congelé.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Acheminer le tube immédiatement au laboratoire.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	< 8h
Méthode analytique	
Analyseur	cobas 8000 / e801, Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens	
Aliquote congelé	1 an
Tarif	
Tarif (CHF)	144