Catalogue des analyses - Laboratoire

Rapport sFlt-1/PIGF

Informations générales

Examen

CAUIICII	
Indication diagnostique	Exclusion d'une prééclampsie Analyse remboursée par la LAMal à partir de la 20ème semaine de grossesse Seuil décisionnel dès la 24ème semaine de grossesse
Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante respectant les conditions préanalytiques (prélèvement acheminé immédiatement au laboratoire)
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	ratio sFlt-1/PlGF, fms-like tyrosine kinase 1, facteur de croissance placentaire, facteur anti-angiogénique, facteur pro-angiogénique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang
Renseignements à fournir	âge gestationnel en SA



Renseignements à fournir

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel

1



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le sérum.
Conservation	Conserver le sérum séparé maximum 24 heures à 4°C. Sinon, congeler le sérum. NB: un seul cycle de congélation/décongélation
Conditions d'acheminement Acheminement	Envoyer le sérum séparé congelé.
Conditions d'acheminement	Acheminer le tube immédiatement au laboratoire.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique
Résultats	
Délai de rendu	< 8h
Méthode analytique	
Analyseur	cobas 8000 / e801, Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé ^{1 an}

Tarif

Tarif (CHF)

