



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# PIGF

Sang

## Informations générales

### Examen

#### Indication diagnostique

Spécification du risque de prééclampsie lors du dépistage prénatal du premier trimestre. Par sa prescription de l'analyse, le prescripteur atteste que la patiente a été informée et a donné son accord pour la facturation de l'analyse.

---

#### Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante respectant les conditions préanalytiques (prélèvement acheminé immédiatement au laboratoire)

---

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

---

#### Horaire de réalisation

24h/24

---

#### Analyse accréditée

OUI

---

#### Spécialité

- Chimie clinique

---

#### Synonyme

facteur de croissance placentaire, facteur pro-angiogénique

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande


999069

##### Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Tube 4.9 ml sérum sans gel</p>  <p>Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990</p>

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

<b>Préparation</b>	Centrifuger et décanter le sérum.
<b>Conservation</b>	<p>Conserver le sérum séparé maximum 24 heures à 4°C. Sinon, congeler le sérum. NB: un seul cycle de congélation/décongélation.</p>
<b>Conditions d'acheminement</b>	Envoyer le sérum séparé congelé.
<b>Acheminement</b>	
<b>Conditions d'acheminement</b>	Acheminer le tube immédiatement au laboratoire
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires 24/24.</a>

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Délai de rendu** < 8h

**Interprétation** Le calcul de risque de prééclampsie n'est pas réalisé au laboratoire et est de la responsabilité du prescripteur.

### Méthode analytique

**Analyseur** Cobas Pro / Roche Diagnostics

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 1 an

### Tarif

**Tarif (CHF)** 80

**Condition(s) spéciale(s)** Cette analyse ne fait pas partie de la liste ses analyses (LA) prises en charge par l'â€™assurance obligatoire des soins (AOS)