



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Anticorps associés aux anti-synthétases

Dépistage

## Informations générales

### Examen

<b>Indication diagnostique</b>	Pneumopathie interstitielle
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/jour
<b>Analyse accréditée</b>	OUI

**Spécialité**

- Auto-immunité

### Prescription

**Formulaire de demande**

Numéro de commande  
741030  
**Lien**  
[050 - Immunologie](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 1.2 ml sérum



Monovette bouchon blanc - N° commande : 734811

### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit et we

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante

### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site**

BH18-100

**Adresse**Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé**Téléphone**

021 31 40 805

**Site web**[Immunologie et allergie](#)**Résultats****Délai de rendu**

1-2 semaines

**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- Immunodot



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé**

6 mois

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

360