



Catalogue des analyses - Laboratoire

D-Lactate (dépistage)

Estimation du D-Lactate urinaire

Information(s) importante(s)

Attention Contact nécessaire avant réalisation

Informations générales

Examen

But de l'analyse Estimation du D-Lactate urinaire

Indication diagnostique Dans un contexte d'acidose métabolique sans augmentation d'un anion connu (L-Lactate, OHBU, ...) et chez des patients ayant des apports de Glucose importants et ayant des possibilités de pullulation bactérienne (intestin court, bypass).

Ajout d'analyse Possibilité d'obtenir une quantification du D-Lactate par envoi de l'échantillon dans un laboratoire externe à l'étranger. Dans tous les cas, appeler préalablement l'universitaire en charge des analyses métaboliques.

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/jour

Spécialité • Chimie clinique

Synonyme D Lactate

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
061220
Lien
[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Renseignements à fournir Cocher l'analyse des acides organiques
Ajouter sous commentaires: recherche D-Lactate

Recommandations Appeler préalablement l'universitaire en charge des analyses métaboliques.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine fraîche

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

2.0 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

1.0 ml

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

15 min

Congelé

72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

2.0 ml

Conservation

Conserver à -20°C

Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• GC-MS• Lactate oxydase
-------------------------------	---

Technique	L'estimation du D-lactate de fait par soustraction de la valeur du L-lactate obtenu par la méthode de lactate oxydase à la valeur du lactate total obtenu par GC-MS.
------------------	--

Post analytique

Tarif	
Tarif (CHF)	245.7