Catalogue des analyses - Laboratoire

Thiopurines (6-TG, 6-MMP)

Sang



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage du taux sanguin (TDM) des thiopurines: 6-TG (6-Thioguanine) et 6-MMP (6-Methylmercaptopurine).
Indication diagnostique	Sur avis du spécialiste. L'interprétation clinique (TDM) du dosage n'est actuellement pas validée pour toutes les indications thérapeutiques.
Renseignement téléphonique	Laboratoire: 021 314 42 71 Interprétation des taux (TDM): 021 31 4 25 00
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Spécialité	Dosages de médicaments
Synonyme	Imurek®, Puri-Nethol®, Lanvis® 6-Mercaptopurine, 6-MP, 6-MMP, 6-Methylmercaptopurine, 6-TG, 6-Thioguanine, Azathioprine, 6-TGN, 6-Thioguanine nucleotide, 6tg, 6mmp, 6tgn
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 016 - Pharmacologie clinique
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament



Pré analytique

Prélèvement

Nature

· Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 6h post-dose)

Délai d'équilibration: 4 semaines à posologie constante

Remarque interne CHUV: Ne pas prélever le week-end (vendredi dès

16h à dimanche midi).

Matériel standard

Quantité

1

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Contenant

Quantité

Microtube 0.5 ml EDTA-K

About de James Amerikan de Jam

Microtainer bouchon mauve - N° commande: 500434

Volume minimum Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec

labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 72h

Réfrigéré 72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation NE PAS CENTRIFUGER, sang complet uniquement (vol. min. 0.3 ml).

Préciser le type d'anticoagulant.

Conservation

A T° amb : Sang complet max 72h jusqu'à réception au laboratoire.

Sinon congeler le sang complet: Idéalement à -80°C, sinon à -20°C



Conditions d'acheminement	Congelé Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi o fériés jusqu'à 15h00. Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et cong PP:439	-
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24.	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé	
Téléphone	021 31 44 271	
Résultats		
Délai de rendu	2-3 jours	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	• HPLC-MS/MS	
Post analytique		
Conservation après examens		
Prélèvement primaire	6 jours	
Aliquote congelé	2 semaines	
Tarif		
Tarif (CHF)	135	



Prestation Tarmed

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min