



Catalogue des analyses - Laboratoire

Levures (Candida) - Culture

Frottis d'orifice et point de ponction (cathéter - drain)



Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche spécifique de levures (*Candida* ou autres) dans les échantillons d'orifice de drain et de point de ponction de cathéter.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Mycologie - levures
- Mycologie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Frottis point de ponction cathéter
- Frottis orifice de drain

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

Contenant(s) autre(s)

ESwab (bouchon orange Copan)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Tube ESwab (Copan, bouchon rose) ou équivalent.

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

Température ambiante, délai < 24 heures.

Acheminement

Conditions d'acheminement

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de microbiologie

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

Astreinte

Microbiologie

Résultats**Délai de rendu**

< 1 semaine

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- Culture



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

10 jours

Tarif

Tarif (CHF)

63

Condition(s) spéciale(s)

- Position 3343.00 si positif = 70 CHF - Position 3342.00 si négatif = 22 CHF.
- La culture de Levure nâ€™est pas facturée si elle est effectuée conjointement à la Bactériologie culture.