

Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie - Hémoculture pédiatrique \geq 18 kg

Bactéries (sauf Mycobactéries) et Levures

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche par culture de bactéries et levures dans le sang.
- La recherche de bactéries anaérobies n'est possible que dans le flacon Anaérobic, bouchon violet.
- En cas de suspicion de germes à croissance lente ou endocardite, une prolongation d'incubation peut être demandée mais uniquement par téléphone au 021 314 41 07.

Indication diagnostique

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Hémoculture par cathéter: Cocher également la localisation sur le bon.

Date et heure de prélèvement

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang

Instruction(s) particulière(s)

Ne rien coller sur le code-barre du flacon.
Ne pas détacher le code-barre du flacon.

Matériel standard

Contenant

Flacon BD BACTEC PLUS Aerobic/F Medium - bouchon bleu + Flacon
BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Medium - bouchon violet



NULL

Contenant(s) autre(s)

Si pas possible d'ensemencer les 2 flacons, privilégier le flacon Aerobic
- bouchon bleu

Volume minimum

8 - 10 ml par flacon

Acheminement

Conditions d'acheminement

Acheminement immédiat par poste pneumatique ou par porteur.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de microbiologie

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Microbiologie

Résultats

Interprétation Les résultats positifs sont communiqués par téléphone.

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 139.5

Condition(s) spéciale(s) Position 3305.00 si positif = 155 CHF - Position 3304.00 si négatif = 50 CHF.
Pas de surfacturation pour le 2ème flacon.