Catalogue des analyses - Laboratoire

Cryptococcus neoformans antigènes (Test rapide)

Liquide céphalo-rachidien (LCR)



Informations générales

Examen

But de l'analyse	 Détection par test immunochromatographique des antigènes capsulaires de Cryptococcus neoformans dans le LCR. En cas de résultat positif, une titration est effectuée. Idéalement l'analyse devrait également être effectuée dans le sang ou sérum.
Ajout d'analyse	 L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures. Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	BactériologieMicrobiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso.



Pré analytique

Prélèvement

• Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube polystyrène fond conique 15ml stérile

1

Bouchon bleu - N°commande: 500010

Volume minimum 0.5 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si cumul d'analyses du bon IMU - 151, 2 ml de volume total de l'échantillon sont nécessaires.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation 2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement • Température ambiante

• Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.

• Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est

donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires
Analytique Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Immunochromatographie



Principe de la méthode

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

Tarif

Tarif (CHF)

Condition(s) spéciale(s)Position 3414.00, détection qualitative (=Tarif indiqué). Si détection

positive, quantification effectuée, position 3416.00 (la position 3416.00

annule la position 3414.00)

