Catalogue des analyses - Laboratoire

Culture Plaquettes, Flacon sang, Cellules souches, Leucaphérèses

Informations générales

Examen

| But de l'analyse | Recherche par culture de bactéries et levures dans les échantillons de type, flacons de sang, plaquettes, cellules souches et leucaphérèses. Faire parvenir au laboratoire un ou deux flacons "BACTEC": Le flacon pédiatrique (gris) est dédié aux faible volume de 1 à 3 ml (Il ne permet pas la culture des germes anaérobies) Les flacons aérobies (bleu) et anaérobies (violet) sont dédiés à des volumes plus élevés, de 8 à 10 ml par flacon |
|----------------------------|---|
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 107 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | BactériologieMicrobiologique |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques |
| Renseignements à fournir | Bon 151 recto - Autre prélèvement en bas de page - Indiquer l'échantillon Bon 151 verso - Bactériologie - Cocher Culture |



Pré analytique

Prélèvement

• Cellules souches
• Flacon de sang

LeucaphérèsePlaquettes

Instruction(s) particulière(s)

• Ne rien coller sur le code-barre du flacon.

• Ne pas détacher le code-barre du flacon.

Matériel standard

Quantité Selon le volume 1 flacon ou 2 flacons

Flacon BD BACTEC PLUS Aerobic/F Medium - bouchon bleu + Flacon
BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Medium - bouchon violet



NULL

Contenant(s) autre(s)Flacon BD BACTEC Peds Plus Medium – bouchon gris (faible volume 1 à 2 ml)

3 ml)

Volume minimum Respecter les volumes indiqués sur chaque flacon

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation Température ambiante durant la nuit (Ne jamais mettre au frigo)

Acheminement

Conditions d'acheminementTempérature ambiante et transfert dès que possible (recommandé ≤ à

24 heures)

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires



| Site | BH18-100 |
|-------------------------------------|--|
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture de la réception | Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Astreinte | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| Site web | Réception des laboratoires |

Analytique

Prestataire

| Prestataire | Laboratoire de microbiologie |
|------------------------------------|--|
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00 |
| Téléphone | 021 314 41 07 |
| Astreinte | Microbiologie |
| Méthode analytique | |
| Principe de la méthode | • Culture |



Post analytique

Tarif

139.5 Tarif (CHF)

Position 3305.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3304.00 si Condition(s) spéciale(s)

négatif.

