

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Culture Plaquettes, Flacon sang, Cellules souches, Leucaphérèses

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

- Recherche par culture de bactéries et levures dans les échantillons de type, flacons de sang, plaquettes, cellules souches et leucaphérèses.
- Faire parvenir au laboratoire un ou deux flacons "BACTEC":
- Le flacon pédiatrique (gris) est dédié aux faible volume de 1 à 3 ml (Il ne permet pas la culture des germes anaérobies)
- Les flacons aérobies (bleu) et anaérobies (violet) sont dédiés à des volumes plus élevés, de 8 à 10 ml par flacon

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

743200

##### Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

#### Renseignements à fournir

- Bon 151 recto - Autre prélèvement en bas de page - Indiquer l'échantillon
- Bon 151 verso - Bactériologie - Cocher Culture

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Cellules souches
- Flacon de sang
- Leucaphérèse
- Plaquettes

#### Instruction(s) particulière(s)

- Ne rien coller sur le code-barre du flacon.
- Ne pas détacher le code-barre du flacon.

### Matériel standard

#### Quantité

Selon le volume 1 flacon ou 2 flacons

#### Contenant

Flacon BD BACTEC PLUS Aerobic/F Medium – bouchon bleu + Flacon  
BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Medium – bouchon violet



NULL

#### Contenant(s) autre(s)

Flacon BD BACTEC Peds Plus Medium – bouchon gris (faible volume 1 à  
3 ml)

#### Volume minimum

Respecter les volumes indiqués sur chaque flacon

### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

Nuit

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conservation

Température ambiante durant la nuit (Ne jamais mettre au frigo)

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Température ambiante et transfert dès que possible (recommandé ≤ à  
24 heures)

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de microbiologie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Microbiologie

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- Culture



## Post analytique

### Tarif

#### Tarif (CHF)

139.5

#### Condition(s) spéciale(s)

Position 3305.00 si positif (= Tarif indiqué) – Position 3304.00 si négatif.