

Catalogue des analyses - Laboratoire

Culture Plaquettes, Flacon sang, Cellules souches, Leucaphérèses

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche par culture de bactéries et levures dans les échantillons de type, flacons de sang, plaquettes, cellules souches et leucaphérèses.
- Faire parvenir au laboratoire un ou deux flacons "BACTEC":
- Le flacon pédiatrique (gris) est dédié aux faible volume de 1 à 3 ml (Il ne permet pas la culture des germes anaérobies)
- Les flacons aérobies (bleu) et anaérobies (violet) sont dédiés à des volumes plus élevés, de 8 à 10 ml par flacon

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

- Bon 151 recto - Autre prélèvement en bas de page - Indiquer l'échantillon
- Bon 151 verso - Bactériologie - Cocher Culture

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Cellules souches
- Flacon de sang
- Leucaphérèse
- Plaquettes

Instruction(s) particulière(s)

- Ne rien coller sur le code-barre du flacon.
- Ne pas détacher le code-barre du flacon.

Matériel standard

Quantité

Selon le volume 1 flacon ou 2 flacons

Contenant

Flacon BD BACTEC PLUS Aerobic/F Medium - bouchon bleu + Flacon
BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Medium - bouchon violet



NULL

Contenant(s) autre(s)

Flacon BD BACTEC Peds Plus Medium - bouchon gris (faible volume 1 à
3 ml)

Volume minimum

Respecter les volumes indiqués sur chaque flacon

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Température ambiante durant la nuit (Ne jamais mettre au frigo)

Acheminement

Conditions d'acheminement

Température ambiante et transfert dès que possible (recommandé ≤ à
24 heures)

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

139.5

Condition(s) spéciale(s)

Position 3305.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3304.00 si négatif.