



Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie générale culture

Liquides biologiques et drainages

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche par culture de bactéries aérobies et anaérobies dans des échantillons de type, liquides et ponctions biologiques.
- Recherche par culture de bactéries aérobies dans des échantillons de type, liquide de drainage

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide
- Liquide cavité normalement stérile
- Liquide ponction
- Liquide drainage

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)

Tube polystyrène fond conique 15 ml ou 50 ml stérile (bouchon bleu)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de microbiologie

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode • Culture

Technique Si présence de l'analyse Enrichissement culture, la durée d'incubation peut aller jusqu'à 20 jours.

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours

Tarif

Condition(s) spéciale(s) Selon le type d'échantillons les positions positives et négatives sont différentes:

- Liquides/ponctions: Position 3318.00 si positif - Position 3317.00 si négatif
- Liquides dialyse péritonéale: Position 3316.00 si positif - Position 3315.00 si négatif



- Liquides de drainage: Position 3337.00 si positif - Position 3336.00 si négatif
- Sperme: Position 3323.00 si positif - Position 3322.00 si négatif