

Catalogue des analyses - Laboratoire

Acide vanylmandélique

Spot Urinaire - Neuroblastome

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Neuroblastome
Préparation du patient	J-3 arrêt médicaments suivants, selon OM: Adelphan, Aldomet, artérenol, dopamine, isoprénaline, Isuprel, Novadral. Aucune préparation pour d'autres examens (lavement, urographie,...). Eviter les situations de stress. 24h avant et pendant la collecte, ne pas absorber de café, thé, chocolat, banane, noix, amandes, ananas, aubergine, kiwi, avocat, prune, tomate et alcool.
Renseignement téléphonique	021 31 40 741
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Fréquence et/ou horaire d'exécution	1x/semaine le lundi matin; rendu des résultats le lundi après-midi
Synonyme	AVM, VMA, vanylmandélate, vanilmandelic acid, vanilmandélate, vanilmandélique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 959432 Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 019 - Laboratoire catécholamines et peptides
Renseignements à fournir	- La créatinine urinaire : faire une demande séparée au LCC avec le bon n°11. Le citrate de sodium n'influence pas le dosage. - Médicaments administrés

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Spot urine

Instruction(s) particulière(s)

Marche à suivre

1. Remplir le bon de demande n°19 pour l'acide vanylmandélique (VMA) catécholamines et peptides), y noter l'heure de récolte. Préparer également demande n°11 pour le dosage de la créatinine urinaire (LCC).

2. Collecter les urines du patient (une seule miction) dans un flacon ou un tube d'urine.

3. Transférer 8.5 ml d'urine du flacon ou de la poche de récolte dans une fiole jaunie stérile pour urine. (Porter des gants lors de la manipulation des urines). Porter également un tube pour la créatinine urinaire, sans citrate de sodium.

4. Ajouter dans la monovette de 8.5 ml d'urine **100 mg de poudre de sodium** monobasic CAS 18996-35-5

<http://catalog.chuv.ch/Fichierdesexamens/Laboratoires/EntityInstance> des petits tubes Eppendorf transparents contenant la quantité de 100 mg de sodium sont disponibles et prêts à l'emploi dans les vidoirs des unités de soins ambulatoire de l'unité d'hématologie oncologie pédiatrique. Une fois ajoutée, mélanger. (Il n'y a pas de précautions d'emploi particulières pour le citrate de sodium).

5. Envelopper la monovette bouchon jaunie dans du papier aluminium et que possible (maximum dans les 48 heures suivant le prélèvement) sur lumière (dans du papier aluminium) au laboratoire des catécholamines bon de demande n°19.

6. Veiller à ce qu'il reste toujours en réserve au moins 2 petits tubes Eppendorf contenant 100mg de poudre de citrate de sodium. Lorsque le stock arrivant Eppendorf restant, veuillez avertir l'équipe de recherche clinique de l'unité d'oncologie pédiatrique pour le réapprovisionnement (tel 4 67 69 ou 4 35 20).
N.B : s'il n'est pas possible d'acheminer de suite le prélèvement garder à l'obscurité pendant 48 heures maximum (ou à -20°C pendant maximum 4 semaines).

Le citrate de sodium assure une sécurité d'emploi pour le patient, un pH en raison de son fort pouvoir tampon, et une meilleure stabilisation des des métanéphrines urinaires, ainsi que du VMA, du HVA et surtout du 5-HIAA aux pH trop acides.

Matériel standard

Quantité

1 à 2 tubes

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaunie - N° commande : 949151

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour les dosages des catécholamines urinaires, des métanéphrines urinaires et des VMA.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception du laboratoire des catécholamines et peptides

Site

NES 06-6019

AdresseAvenue Pierre Decker
1011 Lausanne**Horaire d'ouverture de la réception**Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé**Téléphone**

021 31 40 741

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire des catécholamines et peptides

Site

NES 06-6019

AdresseAvenue Pierre Decker
1011 Lausanne**Horaire d'ouverture du laboratoire**Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé**Téléphone**

021 31 40 741

Résultats**Délai de rendu**

1 semaine

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- LC-MS/MS
- Spectrométrie de masse

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

72.9

Condition(s) spéciale(s)

Supplément selon la liste des analyses facturables en sus