



Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie générale culture

Stérilet

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche par culture de bactéries aérobies et anaérobies dans les échantillons de stérilet.
- La recherche par culture d'Actinomyces est également effectuée.

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

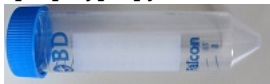
[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	<p>Tube conique polypropylène stérile 50ml</p>  <p>Bouchon bleu - N° commande : 316623</p>
Contenant(s) autre(s)	Récipient stérile, PS, fond plat
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151
Stabilité maximale avant analyse	
Réfrigéré	Nuit
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Conservation	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	<ul style="list-style-type: none"> • Température ambiante • Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures. • Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de microbiologie

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 243

Condition(s) spéciale(s)

- Bactériologie générale: Position 3339.00 si positif - Position 3338.00 si négatif
- Actinomyces: Position 3343.00 si positif - Position 3342.00 si négatif