Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_01733

V4 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie générale culture

Stérilet



Informations générales

Examen

But de l'analyse	 Recherche par culture de bactéries aérobies et anaérobies dans les échantillons de stérilet. La recherche par culture d'Actinomyces est également effectuée.
Ajout d'analyse	 L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures. Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	BactériologieMicrobiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso.



Pré analytique

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube conique polypropylène stérile 50ml

1

Bar Joseph

Bouchon bleu - N° commande : 316623

Contenant(s) autre(s)Récipient stérile, PS, fond plat

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses 1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation 2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

• Température ambiante

• Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.

• Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280



Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture
Post analytique	
Tarif	
Tarif (CHF)	243
Condition(s) spéciale(s)	 Bactériologie générale: Position 3339.00 si positif - Position 3338.00 si négatif Actinomyces: Position 3343.00 si positif - Position 3342.00 si négatif

