



Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie générale culture

Stérilet

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche par culture de bactéries aérobies et anaérobies dans les échantillons de stérilet.
- La recherche par culture d'Actinomyces est également effectuée.

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 50ml 
	Bouchon bleu - N° commande : 316623
Contenant(s) autre(s)	Récipient stérile, PS, fond plat

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré	Nuit
-----------	------

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Conservation	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.
--------------	---

Acheminement

Conditions d'acheminement	<ul style="list-style-type: none">Température ambianteLe délai recommandé est de ≤ 24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
---------------------------	--

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de microbiologie

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

Téléphone

021 314 41 07

Astreinte

Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

243

Condition(s) spéciale(s)

- Bactériologie générale: Position 3339.00 si positif - Position 3338.00 si négatif
- Actinomyces: Position 3343.00 si positif - Position 3342.00 si négatif