



Catalogue des analyses - Laboratoire

Campylobacter, Salmonella, Shigella - Culture

Biopsies anus, colon, rectum



Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche par culture des pathogènes Campylobacter, Salmonella, Shigella
- Si autre type de culture souhaité, prendre contact avec le laboratoire.

Ajout d'analyse

- Ajout dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

- Bon 151 recto - Tissus - Cocher biopsie et indiquer la localisation dans le champ en bas de page
- Bon 151 verso - Bactériologie - Cocher Culture (Recherche de Salmonella, Shigella et Campylobacter)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Biopsie anale
- Biopsie colique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤ 24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de microbiologie

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

Téléphone

021 314 41 07

Astreinte

Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

10 jours.

Tarif**Tarif (CHF)**

139.5

Condition(s) spéciale(s)

Position 3327.00 si positif = 155 CHF - Position 3326.00 si négatif = 78 CHF.