

Catalogue des analyses - Laboratoire

Cryptococcus culture

Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche de Cryptococcus par culture spécifique dans le LCR. Analyse complémentaire à la détection des antigènes

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Mycologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube polystyrène fond conique 15ml stérile



Bouchon bleu – N°commande : 500010

Volume minimum	2 ml
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Si cumul d'analyses du bon IMU – 151, 2 ml de volume total de l'échantillon sont nécessaires.
Stabilité maximale avant envoi	
Réfrigéré	Nuit
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Conservation	2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	<ul style="list-style-type: none"> • Température ambiante • Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée) • Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaires d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> Culture
Technique	La durée d'incubation est de 7 à 9 jours

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	1 année
Tarif	
Tarif (CHF)	77.4
Condition(s) spéciale(s)	Position 3412.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3411.00 si négatif