Catalogue des analyses - Laboratoire

Mycoplasmes urogénitaux - Culture

Frottis sphère génitale



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Recherche par culture de Mycoplasmes urogénitaux (<i>Mycoplasma hominis</i> et Ureaplasmes) dans les échantillons de la sphère génitale.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Bactériologie
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques

Renseignements à fournir



Pré analytique

Prélèvement

Nature

- · Frottis col
- Frottis gland
- Frottis gynécologique
- Frottis lochies
- Frottis périnée
- Frottis urètre
- · Frottis vaginal
- Frottis urogénital

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des

analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Utilisation d'un récipient stérile.
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	Température ambiante, délai < 24 heures.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	 T° ambiante Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.



Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires


Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture



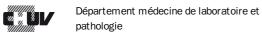

Post analytique

Conservation après examens

10 jours Prélèvement primaire

Tarif

37.8 Tarif (CHF)

