Catalogue des analyses - Laboratoire

## Moisissures (Champignons filamenteux) - Culture

Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

## Informations générales

But de l'analyse	Recherche par culture de moisissures ( <i>Aspergillus</i> ou autres) dans les échantillons de lavage broncho-alvéolaire (LBA).
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul><li> Mycologie - moisissures</li><li> Mycologie</li></ul>
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Pré analytique	
Prélèvement	
Nature	Lavage broncho-alvéolaire (LBA)
Matériel standard	

1



Quantité

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)	Tube à aspiration
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151
Stabilité maximale avant envoi	

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Utilisation d'un récipient stérile.
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	Température ambiante, délai < 24 heures.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h20-15h30



Réfrigéré

Samedi: 6h30-15h30

	Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique  Principe de la méthode	• Culture
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	10 jours.
Tarif	
Tarif (CHF)	77.4
Condition(s) spéciale(s)	Position 3352.00 si positif = 86 CHF - Position 3351.00 si négatif = 55 CHF.

