Catalogue des analyses - Laboratoire

Nocardia culture

Bronchoscopies

Informations générales

C.,
Examen

But de l'analyse	Recherche de Nocardia par culture spécifique dans les échantillons de bronchoscopies.
Ajout d'analyse	 L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures. Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	BactériologieMicrobiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso.
Pré analytique	
Prélèvement	
Nature	Aspiration bronchiqueLavage broncho-alvéolaire (LBA)
	•
Matériel standard	
Matériel standard Quantité	1



Contenant



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)	Flacons pour lavage alvéolaire / aspiration 180 ml
Volume minimum	2 ml
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.
Stabilité maximale avant envoi	

Réfrigéré Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée)
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires
Analytique Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture
Technique	La durée d'incubation est de 7 à 9 jours



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours

Tarif

Tarif (CHF)

Condition(s) spéciale(s)Position 3343.00 si positif (= Tarif indiqué) – Position 3342.00 si

négatif

