



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Mycoplasmes urogénitaux culture**

Frottis sphère urogénitale

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

- Recherche par culture des Mycoplasmes urogénitaux, soit *Metamycoplasma hominis* et *Ureaplasma spp.*
- Ne comprend pas la recherche de *Mycoplasma genitalium* (Uniquement par PCR)

#### Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

743200

##### Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

#### Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Frottis urogénital

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

#### Contenant(s) autre(s)

ESwab (bouchon orange Copan)

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

#### Stabilité maximale avant analyse

#### Réfrigéré

Nuit

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de  $\leq 24$  heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de microbiologie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Microbiologie

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Culture</li></ul>
-------------------------------	---

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Prélèvement primaire</b>	10 jours.
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	37.8