

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Macroprolactine

Sang

## Informations générales

### Examen

**Ajout d'analyse** dans les 48h, sinon possible au cas où une sérothèque existe

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 121

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité**

- Chimie clinique

**Synonyme** big-big prolactine, big prolactine

### Prescription

**Formulaire de demande**
**Numéro de commande**  
999069  
**Lien**  
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

**Renseignements à fournir** inscrire manuellement "macroprolactine" sur le formulaire de demande

## Pré analytique

### Prélèvement


**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 4.9 ml héparinate de lithium

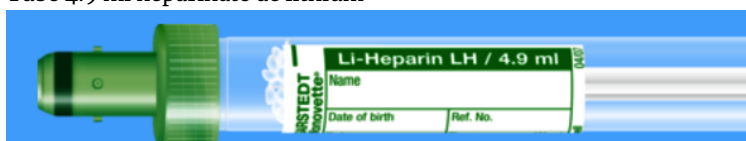


Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit, y compris

### Matériel pédiatrique

**Quantité** 2

**Contenant** Microtube 0.3 ml héparinate de lithium

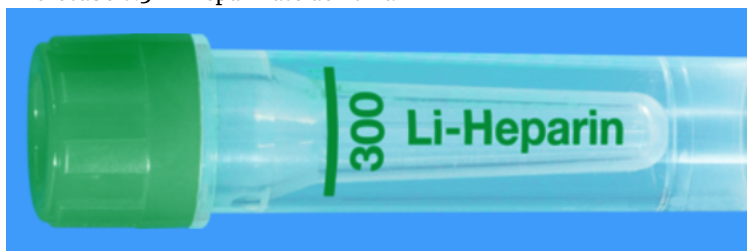

Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

**Volume minimum** 2 microtubes bien remplis  
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Augmenter le nombre de microtubes

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation** Centrifuger et décanter le plasma :  
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml  
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.4 ml

**Conservation** Conserver le plasma à 4°C

**Conditions d'acheminement** à T° ambiante

### Acheminement

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280

**Site web**[Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de chimie clinique

**Site**

BH18-100

**Adresse**Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

24/24H

**Téléphone**

021 31 44 121

**Site web**[Chimie clinique](#)**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- ECLIA

**Analyseur**

cobas e 801 / Roche Diagnostics

**Technique**

Mesure de recouvrement après précipitation au PEG.

## Post analytique

**Conservation après examens****Aliquote congelé**

3 mois

**Tarif****Tarif (CHF)**

26.6

**Condition(s) spéciale(s)**

Selon LA pour position 1623.00: "Double détermination en cas de suspicion de macroprolactinémie".