

Catalogue des analyses - Laboratoire

Macroprolactine

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse dans les 48h, sinon possible au cas où une sérothèque existe

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Synonyme big-big prolactine, big prolactine

Prescription

Formulaire de demande
Numéro de commande
999069
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir inscrire manuellement "macroprolactine" sur le formulaire de demande

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml héparinate de lithium

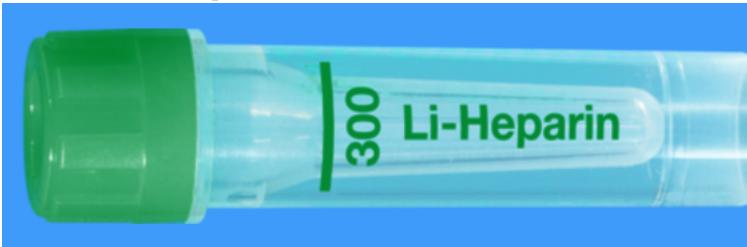




Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit, y compris si les analyses sont effectuées à des périodes différentes.

Matériel pédiatrique

Quantité	2
Contenant	<p>Microtube 0.3 ml héparinate de lithium</p> 
	<p>Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003</p>
Volume minimum	2 microtubes bien remplis (pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Augmenter le nombre de microtubes
Traitements du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Centrifuger et décanter le plasma : - volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml - volume minimum pour l'analyse seule : 0.4 ml
Conservation	Conserver le plasma à 4°C
Conditions d'acheminement	à T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280



Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode • ECLIA

Analyseur cobas e 801 / Roche Diagnostics

Technique Mesure de recouvrement après précipitation au PEG.

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 26.6

Condition(s) spéciale(s) Selon LA pour position 1623.00: "Double détermination en cas de suspicion de macroprolactinémie".