Catalogue des analyses - Laboratoire

## **Moisissures culture - Champignons filamenteux**

Moelle osseuse



## Informations générales

## Examen

But de l'analyse	Recherche de moisissures ( <i>Aspergillus</i> ou autres) par culture spécifique dans la moelle osseuse.
Ajout d'analyse	<ul> <li>L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.</li> <li>Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.</li> </ul>
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul><li> Mycologie - moisissures</li><li> Microbiologique</li></ul>
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso.



## Pré analytique

**Prélèvement** 

• Moelle osseuse

**Matériel standard** 

**Quantité** 

**Contenant** Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande: 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si autres analyses culture demandées elles peuvent être effectués Si PCR demandées, cf. fiches correspondantes (Sang EDTA).

Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Conservation** 2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

**Acheminement** 

**Conditions d'acheminement** 

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée)
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00



Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
	004 044 44 05
Téléphone	021 314 41 07
Téléphone Astreinte	Microbiologie
Astreinte	
Astreinte Méthode analytique	Microbiologie
Astreinte  Méthode analytique  Principe de la méthode	Microbiologie  • Culture
Astreinte  Méthode analytique  Principe de la méthode  Technique	Microbiologie  • Culture
Astreinte  Méthode analytique  Principe de la méthode  Technique  Post analytique	Microbiologie  • Culture
Astreinte  Méthode analytique  Principe de la méthode  Technique  Post analytique  Conservation après examens	• Culture  La durée d'incubation est de 7 à 9 jours
Astreinte  Méthode analytique  Principe de la méthode  Technique  Post analytique  Conservation après examens  Prélèvement primaire	• Culture  La durée d'incubation est de 7 à 9 jours

